



MADE IN ITALY

# KING RAISED TOILET SEATS

WITH LATERAL LOCKING SYSTEM

EN USER MANUAL  
 DE BENUTZERHANDBUCH  
 FR MANUEL DE L'UTILISATEUR  
 ES MANUAL DE USUARIO  
 IT MANUALE D'USO  
 PT MANUAL DO USUÁRIO  
 SL NAVODILA ZA UPORABO  
 HR KORISNIČKI PRIRUČNIK  
 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
 RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  
 SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA  
 CS UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 LT VARTOTOJO VADOVAS  
 ET KASUTUSJUHEND  
 LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  
 FI OHJEKIRJA  
 SV ANVÄNDARMANUAL  
 NL HANDLEIDING



KING-5-KN  
 KING-10-KN  
 KING-15-KN



KING-5S02/04-KN  
 KING-10S02/04-KN  
 KING-15S02/04-KN



KING-5L-KN  
 KING-10L-KN  
 KING-15L-KN



KING-5LS02/04-KN  
 KING-10LS02/04-KN  
 KING-15LS02/04-KN



KING-L-KN  
 KING-LS-KN



KING-CRTS02-KN  
 KING-CRTS04-KN



KING-BDT-KN

# KING NASADEK TOALETOWYCH Z BOCZNYM SYSTEMEM BLOKOWANIA

## PRZEZNACZENIE:

Produkty z linii *nasadek toaletowych KING z bocznym systemem blokowania* zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wysokości muszli klozetowej, aby ułatwić siadanie i wstawanie oraz promować niezależność i wygodę. Modele wyposażone w miękką poduszkę zapewniają lepszy komfort siedzenia, dzięki czemu są miękkie i przytulne. Ponadto chropowata powierzchnia poduszki zapewnia większe tarcie i stabilność. Produkt jest dostępny w różnych konfiguracjach, z miękką poduszką lub bez oraz z pokrywą lub bez. Miękkie poduszki są dostępne w różnych kolorach. Pokrywa, bidet i miękkie poduszki są również dostępne osobno jako akcesoria.

## WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA:

Produkty z linii nasadek toaletowych KING z bocznym systemem blokowania przeznaczone są dla osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z ograniczoną ruchomością odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kolan lub bioder, a także dla wszystkich tych, którzy mogą mieć trudności z siadaniem i wstawaniem z muszli klozetowej. Modele wyposażone w miękką poduszkę odkształcają się podczas siedzenia, zwiększając powierzchnię podparcia użytkownika i umożliwiając lepsze rozłożenie ciężaru. Sprawia to, że wersje te są szczególnie odpowiednie, jeśli użytkownik cierpi na odleżyny lub choroby, które mogą je powodować, takie jak cukrzyca. Podczas użytkowania wymagana jest zdolność do samodzielnego siedzenia. Nie zaleca się korzystania z produktu w przypadku zaburzeń percepcji lub problemów z równowagą podczas siedzenia.

## OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi użytkownika podanej w instrukcji obsługi.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że produkt znajduje się w stabilnej pozycji na toalecie i jest prawidłowo zamocowany za pomocą dostarczonego systemu blokującego.
- Należy upewnić się, że miękka poduszka prawidłowo otacza siedzisko.
- Przed nałożeniem miękkiej poduszki należy upewnić się, że deska sedesowa jest czysta i sucha.
- Podczas montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu ani jego komponentów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub zmieniony w jakikolwiek sposób.
- Należy upewnić się, że wysokość produktu jest taka, aby ułatwić i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi.
- Podczas użytkowania należy unikać pozycji, w których ciężar ciała jest zbyt przesunięty do przodu. Nieprawidłowa pozycja może prowadzić do niestabilności i przewrócenia się produktu.
- Produkt i akcesoria nie mogą być przechowywane na zewnątrz.

## INFORMACJE O KONSERWACJI:

Konserwacja produktu obejmuje procedury czyszczenia i odkażania. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i odpowiedni standard higieny, użytkownik powinien wykonać te procedury przed każdym użyciem. Użytkownik musi upewnić się co do integralności strukturalnej urządzenia i jego komponentów, a także sprawdzić dokręcenie śrub. W przypadku procedur czyszczenia i odkażania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy założyć rękawice ochronne.
2. Przed przystąpieniem do dokładniejszej dezynfekcji, najpierw należy usunąć widoczne zabrudzenia.
3. Do czyszczenia należy używać wody lub nieagresywnego detergentu.
4. Przetrzeć suchą i czystą szmatką.

Alternatywnie, produkt może być czyszczony w domowych zmywarkach w maksymalnej temperaturze. Miękką poduszkę należy czyścić wyłącznie ręcznie.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO UŻYCIA:

Produkt nadaje się do ponownego użycia przez innych użytkowników. Przed ponownym użyciem przez inne osoby produkt musi zostać prawidłowo wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed przekazaniem produktu innym osobom produkt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanych sprzedawców.

## PRAWIDŁOWA PROCEDURA UTYLIZACJI:

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych. Należy wcześniej zapytać lokalne władze o prawidłowy i przyjazny dla środowiska sposób utylizacji

## ZGŁASZANIE INCYDENTÓW:

W przypadku poważnego incydentu związanego z użytkowaniem tego produktu należy skontaktować się z producentem tego produktu pod adresem [info@kingbathrooms.com](mailto:info@kingbathrooms.com) oraz odpowiedzialnym organem w danym kraju.



KOD PRODUKTU	OPIS	STRONA
<b>KING-5-KN</b>	Nasadka toaletowa, wys. 5 Cm	<b>44</b>
<b>KING-5L-KN</b>	Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 5 Cm	<b>44</b>
<b>KING-10-KN</b>	Nasadka toaletowa, wys. 10 Cm	<b>44</b>
<b>KING-10L-KN</b>	Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 10 Cm	<b>44</b>
<b>KING-15-KN</b>	Nasadka toaletowa, wys. 15 Cm	<b>44</b>
<b>KING-15L-KN</b>	Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 15 Cm	<b>44</b>
<b>KING-5S02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa, wys. 5 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-5LS02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 5 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-10S02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa, wys. 10 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-10LS02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 10 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-15S02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa, wys. 15 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-15LS02/04-KN</b>	Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 15 Cm, kolor jasno niebieski/szary	<b>45</b>
<b>KING-L-KN</b>	Pokrywa do nasadki toaletowej, wys. 5/10/15 Cm	<b>46</b>
<b>KING-LS-KN</b>	Pokrywa do miękkiej nasadki toaletowej, wys. 5/10/15 Cm	<b>46</b>
<b>KING-BDT-KN</b>	Bidet do nasadki toaletowej z/bez pokrywą, wys. 5/10/15 Cm	<b>47</b>
<b>KING-CRTS2/4-KN</b>	Miękka poduszka do nasadki toaletowej, kolor jasno niebieski/szary	<b>47</b>

## IKONA

## OPIS



Wyprodukowane we Włoszech



Beznarzędziowy montaż



Można myć w zmywarce



Maksymalna waga użytkownika




2 lata gwarancji



Zeskanuj KOD QR, aby zobaczyć film montażowy


KING-5-KN  
KING-10-KN  
KING-15-KN

H = 5/10/15 CM

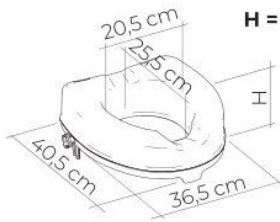

KING-5L-KN  
KING-10L-KN  
KING-15L-KN

H = 5/10/15 CM

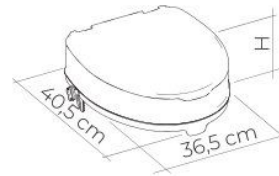

1



3



2



5

4




250 kg  
550 lg




CE MD

KING-5S02/04-KN  
KING-10S02/04-KN  
KING-S02/04-KN

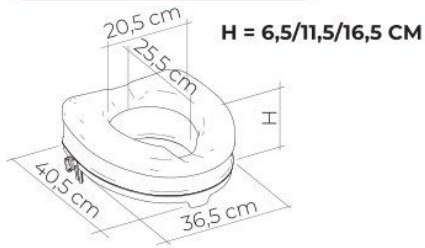

KING-5S02/04-KN  
KING-10S02/04-KN  
KING-S02/04-KN

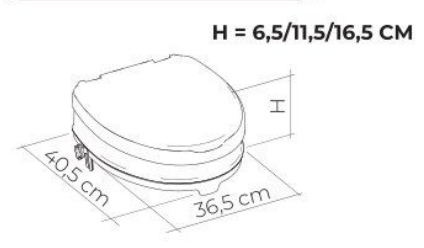

1



2



3



4



5



6



7




250 kg  
550 lb



CE MD

KING-L-KN  
KING-LS-KN

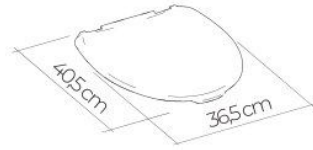

1




KING-L-KN




KING-LS-KN

2

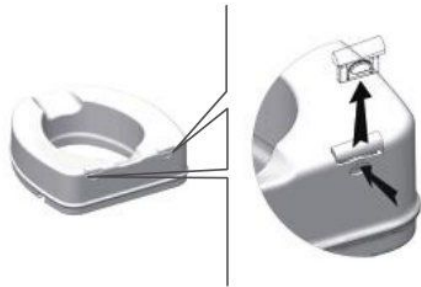


3

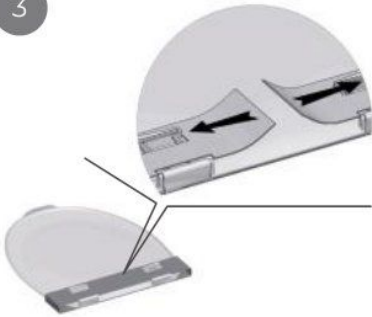


KING-L-KN

4

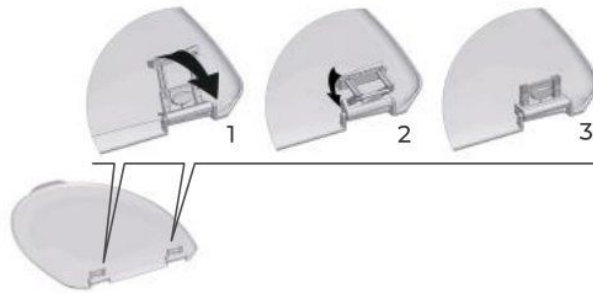

KING-LS-KN

5

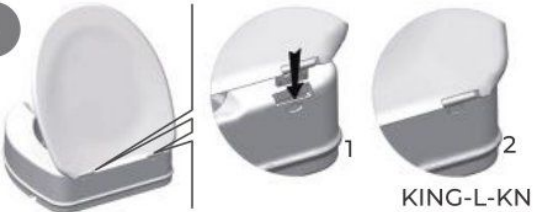

KING-L-KN



KING-LS-KN

6




KING-L-KN



KING-LS-KN



KING-BDT-KN

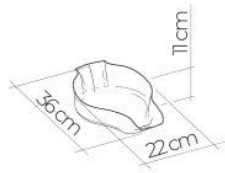

1



2





3



CE MD

KING-CRTS02-KN  
KING-CRTS04-KN

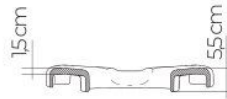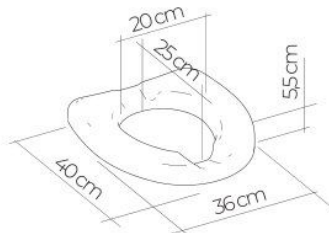

1



2




3



CE MD  
MADE IN P.R.C.



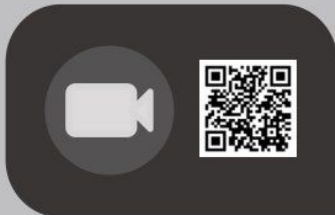

Manufactured by



LM Global Design Ltd.  
Suite 123, The Capel Building  
Mary's Abbey,  
Dublin 7, D07 VY68, Ireland



Distributed by:



[www.kingbathrooms.com](http://www.kingbathrooms.com)  
[info@kingbathrooms.com](mailto:info@kingbathrooms.com)



UM-KINGRTS-KN Rev. 0 as 2023/08