

WPROWADZENIE

Produkt do SAMODZIELNEGO zamaskowania miejsca po brakujących, krzywych lub przebarwionych zębach. Szybkie, proste i tanie rozwiązanie zapewniające idealnie biały uśmiech. Pozwala uzyskać naturalnie wyglądające zęby, nawet w przypadku przebarwień, luk, brakujących lub nawet krzywych zębów !

OPIS:

Jeste to zestaw wygodnych do zdejmowania licówek, które są odpowiednie dla każdego rozmiaru szczęki. Nikt nie pozna że jest to nakładka a nie Twoje własne zęby. Nakładki są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, który jest trwałym materiałem i nie przebarwi się przez długi okres.

- ✓ Nakładki bezpieczne i łatwe w użytku - całkowicie bezpieczne dla człowieka
- ✓ **Możesz uzyskać piękny uśmiech nie korzystając z kosztownych wizyt u dentysty !!**
- ✓ Elastyczny materiał nadający się dla wszystkich kształtów zębów.
- ✓ **Zdrowy uśmiech poprawia pewność siebie**

PARAMETRY:

- **Uniwersalny** rozmiar
- **Niski koszt** w stosunku do wizyty u stomatologa
- Nakładki są w stu procentach bezpieczne dla człowieka
- Cienkie, trwałe i wygodne

INSTRUKCJA:

Przed założeniem nakładki umieść wewnątrz wiskozową wkładkę do gorącej wody na 2 minuty. Po tym jak wiskozowa stanie się miękka nałóż ją wraz z nakładką na górnym łuku zębów i dokładnie dopasuj przyciskając palcami, aby całość się uformowała. Następnie zdejmij całość i zanurz w zimnej wodzie w celu schłodzenia. Teraz proteza jest już gotowa do użycia. Nie używaj kleju do protez!

Nie zaleca się stosowania nakładki na zęby w przypadku, gdy występuje 5 lub więcej ubytków zębów górnych, krwawią nam dziąsła lub jesteśmy w trakcie zabiegów dentystycznych.

1. Umieść materiał wypełniający (wiskozowy) we wrzącej wodzie ok. 90 stopni.
2. Wypełnij formę zmiękczonego materiałem
3. Umieść w jamie ustnej i przygryź, aby dopasować protezę
4. Umieść materiał w zimnej wodzie aby stał się biały, a następnie wyjmij formę

Powielanie i rozpowszechnianie instrukcji zabronione !!!!!