

Sinocare


Poradnik

Safe AQ Smart


System monitorowania poziomu glukozy we krwi

⚠ Przed wykonaniem badania, dokładnie zapoznaj się z treścią tego poradnika.


CE 0123

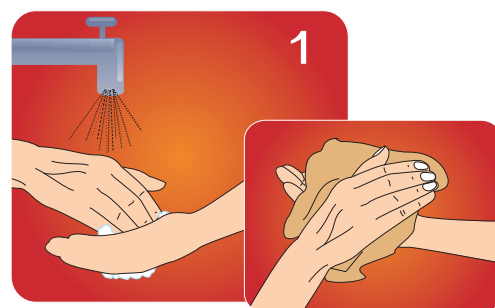


1. Umyj ręce lub użyj wacika nasączonego alkoholem aby oczyścić opuszek palca. **PRZED BADANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE DŁOŃ JEST SUCHA.**

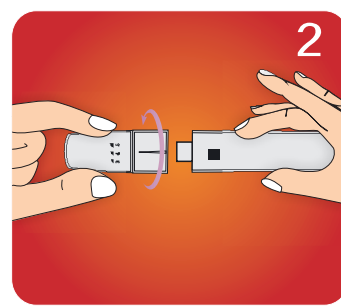


2. Odkręć zatyczkę nakłuwacza.

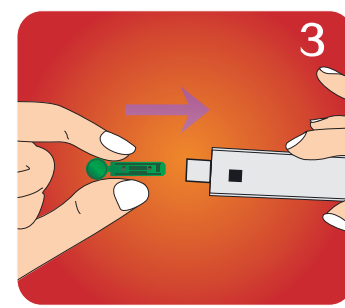

3. Włóż lancetę do nakłuwacza, tak głęboko jak to możliwe.

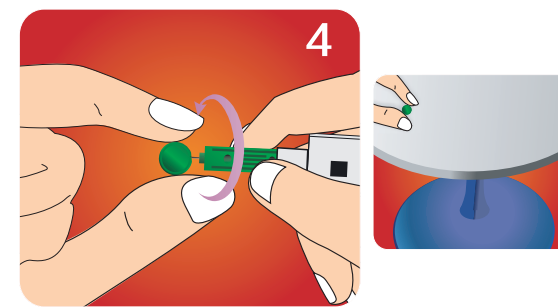


4. Przekręć i pociągnij osłonkę lancety. Nie wyrzucaj osłonki, aby później móc bezpiecznie zutylizować lancetę.

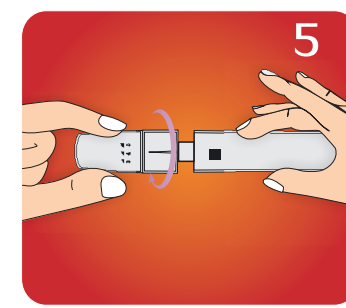


5. Przykręć z powrotem zatyczkę nakłuwacza.

UWAGA: Lanceta służy tylko do jednorazowego użytku.

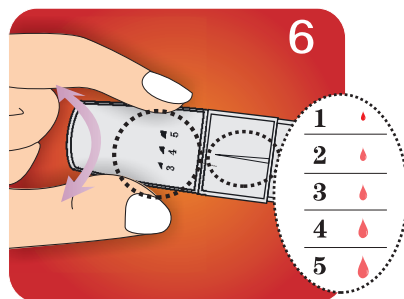


6. Przekręć końcówkę nakłuwacza, aby ustawić głębokość nakłucia.

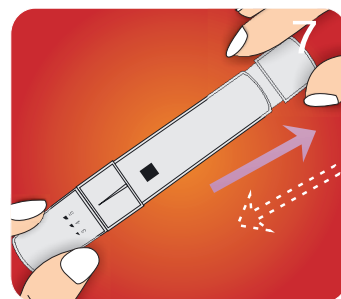


7. Odciągnij sprężynę aby uzbroić nakłuwacz.



8. Wyjmij pasek testowy z pojemnika i natychmiast go zamknij.



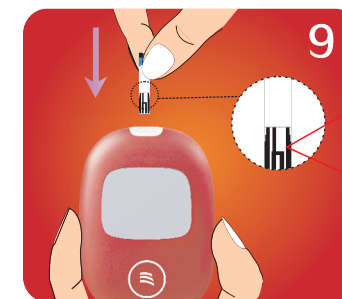


9. Włóż pasek testowy do urządzenia. Glukometr włączy się samoczynnie.

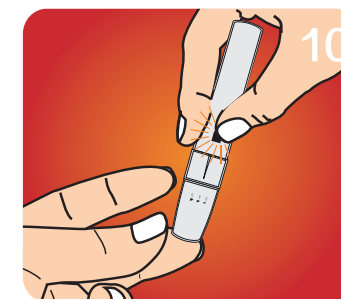

10. Upewnij się, że nakłuwacz jest mocno dociśnięty do palca. Naciśnij przycisk żeby nakłuć.

UWAGA: Jeżeli krew nie zostanie zaaplikowana w ciągu 3 minut od włożenia paska, glukometr wyłączy się. Włóż pasek ponownie i rozpocznij badania.

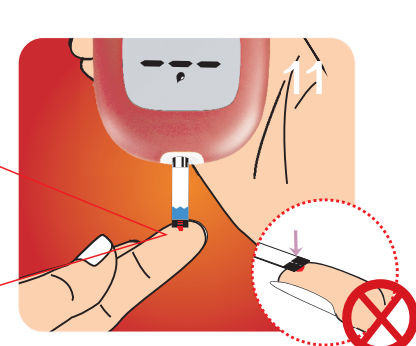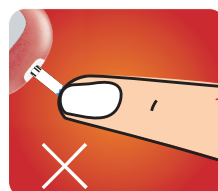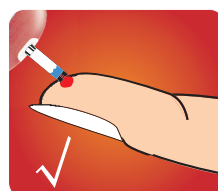


11. Zaaplikuj próbkę krwi.



11. Urządzenie wyświetli wynik badania po 5 sekundach.




13. Usuń pasek testowy.

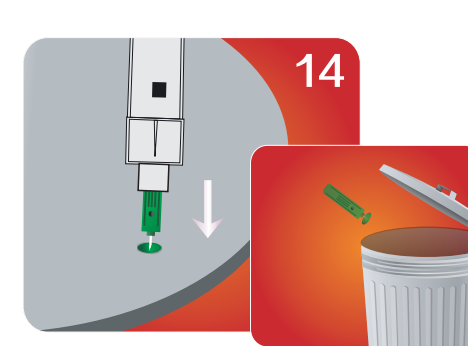


14. Zdjemij zatyczkę nakłuwacza. Mając osłonkę lancety na stole, wbij w nią igłę. Usuń lancetę i przykręć zatyczkę nakłuwacza.


Wyjaśnienia błędów

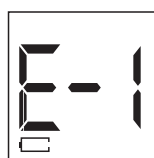

Niski poziom baterii. Wymień je, tak szybko jak to możliwe.

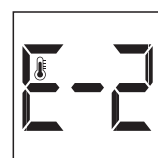


Wykryto temperaturę spoza zakresu działania (10~35°C). Przenieś urządzenie i pasek testowy w odpowiednia miejsce. Poczekaj co najmniej 30 minut i spróbuj ponownie.

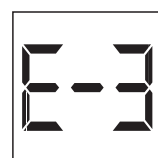


1. Włożono pasek testowy po naniesieniu na niego próbki krwi. Proszę włożyć pasek testowy przed naniesieniem próbki.
2. Pasek używany/przeterminowany/zawilgocony/wystawiony na działanie warunków zewnętrznych przez więcej niż 3 minuty. Proszę użyć nowego paska i spróbować ponownie.



Błąd parametrów. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

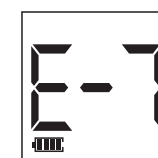



Za mała próbka krwi. Użyj nowego paska i spróbuj ponownie.

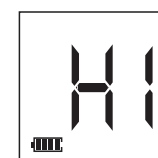

Wynik >600 mg/dL (33,3 mmol/L). Użyj nowego paska i wykonaj jeszcze raz badanie. Jeżeli na ekranie nadal pojawia się HI, skontaktuj się ze swoim lekarzem.



Wynik <20 mg/dL (1,1 mmol/L). Użyj nowego paska i wykonaj jeszcze raz badanie. Jeżeli na ekranie nadal pojawia się LO, skontaktuj się ze swoim lekarzem.

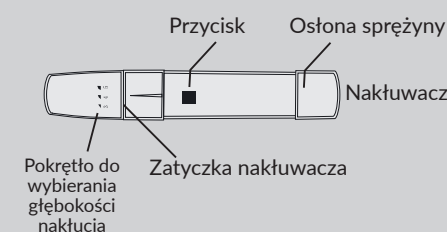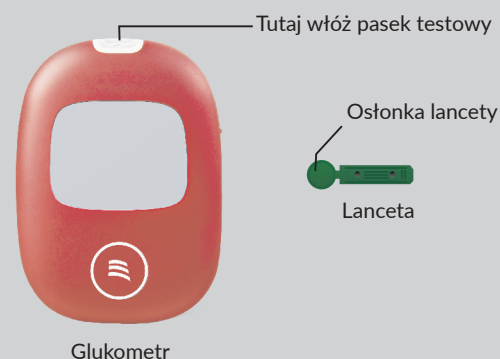

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany.
Tel: +49-40-2513175
Fax: +49-40-255726
E-mail: shholding@hotmail.com

Changsha Sinocare Inc.
No.265, Guyuan Road, Hi-tech Zone, Changsha, Hunan Province, 410205, People's Republic of China
TEL: +86-731-89935581/89935582
FAX: +86-731-89825189
Email: info@sinocare.com
Website: www.sinocare.com

CE 0123
QI-QW-VPW